



ePatch™ GUÍA DE INICIO RÁPIDO

PASO 1: PREPARACIÓN DE LA PIEL



Afeite la zona:
(de ser necesario)




Limpie la piel



Frote la piel


De ser necesario, afeite la zona del pecho para que quede libre de vello. Lave la zona con agua y jabón. Seque sin frotar. Frote suavemente la piel con la almohadilla abrasiva.

PASO 2: COLOQUE EL SENSOR EN EL PARCHE

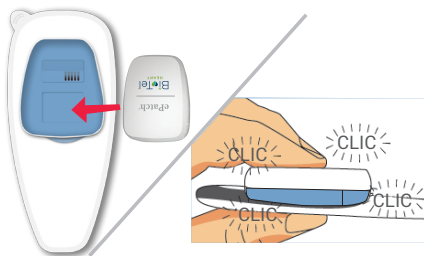


Coloque el sensor en el parche. Presione los cuatro lados para asegurarse de que el sensor esté bien conectado al parche. Escuchará varios clics.

PASO 3: RETIRE LA PELÍCULA PROTECTORA DEL PARCHE

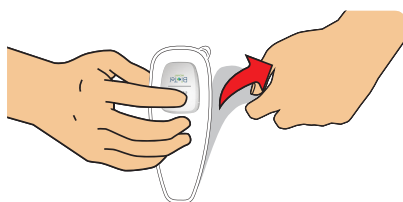

Retire la película protectora de plástico transparente de modo que quede expuesta la parte adhesiva del parche. No toque el adhesivo.


PASO 4: APLIQUE EL PARCHE SOBRE LA PIEL

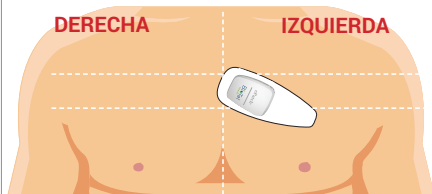

Aplique el parche sobre el pecho en un ángulo leve, como se muestra en la ilustración. Presione todos los lados del parche para que se adhiera a la piel.

DETÉNGASE: Espere 1 minuto antes de continuar con el Paso 5.

PASO 5: QUITÉ EL PAPEL PROTECTOR

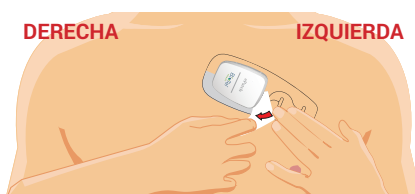

Despegue suavemente el papel protector blanco del parche tirando de la lengüeta para jalar en el centro.



ePatch™

Consejos rápidos para su período de monitoreo



Use ePatch solo durante el tiempo que le indique su médico.

Su receta finaliza el _____



El sensor mostrará una luz verde continua durante 15 segundos y luego una luz verde parpadeante durante 30 segundos después de conectarlo al parche.



Evite el contacto directo con el agua.

ePatch es resistente al agua, no impermeable.



Dé dos golpecitos en el medio del sensor para registrar un síntoma. Esto generará una luz verde. Luego, registre todos los síntomas que sienta en su diario del paciente.



Cuando finalice el período de monitoreo, retire con cuidado el parche del cuerpo y devuelva o envíe por correo el sensor y el diario, según las indicaciones del consultorio de su médico.

Comuníquese con nosotros al **1.877.593.6421** si necesita ayuda o si tiene preguntas durante el período de monitoreo.

El Servicio de Atención al Cliente está disponible:

De lunes a viernes: de 8:00 a.m. a 8:30 p.m., hora del este

Sábados: de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., hora del este

1000 Cedar Hollow Road, Malvern, PA 19355

myheartmonitor.com

BiTel
HEART

Better cardiac data